



VINCENTKA[®] nosní sprej STANDARD hypotonický



Zdravotnický prostředek pro ošetření sliznice nosní dutiny a nosohltanu, který pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice a příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích, chronické rinitidy, sinusitidy a chronické polypózní nasopharyngitidy; u dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobronchitidy a rinitidy.

Složení: Minerální voda z přírodního léčivého zdroje, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhličitá, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická, odželezněná.

Výtah analýzy zdroje BJ 305 - NOVÁ VINCENTKA[®] (RL PLZ MZ ČR - 2017):

Kationty (mg/l)		Anionty (mg/l)		Ostatní látky (mg/l)	
Li ⁺	8,05	F ⁻	2,99	Odželezněno	
Na ⁺	2330,00	Cl ⁻	1690	H ₂ SiO ₃	19,60
K ⁺	125,00	Br ⁻	7,03	HBO ₂	272,00
Ca ²⁺	231,00	I ⁻	6,70	CO ₂	2610,00
Mg ²⁺	16,90	NO ₂	< 0,01		
Sr ²⁺	3,94	NO ₃	< 0,50	Celkem 9443,00 mg/l	
Ba ²⁺	6,67	HCO ₃ ⁻	4700,00	disociovaných a nedisociova-	
Mn ²⁺	0,52	HPO ₄ ²⁻	< 0,05	ných látek.	
Al ³⁺	0,16	SO ₄ ²⁻	7,40		

Použití: Pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice (funkci řasinkového epitelu), umožňuje optimální fungování tzv. slizniční imunity jako primární obrany před infekcí. Používá se pro zvlhčení sliznice celé nosní dutiny a nosohltanu především při pobytu v prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu, v prostorách vytápěných ústředním topením a prostředí znečištěném zejména prachovými částicemi. Celkovým složením hypotonické kyselky s obsahem jodidů příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích, chronické rinitidy, sinusitidy a chronické polypózní nasopharyngitidy. U dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobronchitidy a rinitidy. Aplikace přípravku je vhodná i při stavech po operacích nosních mandlí. Doporučuje se též proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejich recidiv. Je bezpečný při dlouhodobém použití a není návykový.

Dávkování: 1-2 vstříky do každé nosní dírky tak často, jak je třeba (denní dávka není omezena). 1 vstřík = 0,1ml.

Pokyny k použití: Sejměte modrý ochranný kryt z aplikátoru spreje a před prvním použitím několikrát stlačte manžetu po obvodu aplikátoru, dokud se nezačne tvořit aerosol. Začněte používat běžným způsobem. Po každém použití aplikátor očistěte a nasadte ochranný kryt.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let. Skladujte v suchu a temnu při teplotě od 0°C do 25°C. Po prvním použití spotřebujte do 6 týdnů. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Vysoký obsah minerálních solí v nosním spreji může způsobit usazování krystalků solí na dně lékovky, které však nesnižují kvalitu obsahu. Tyto krystalky mohou způsobit ucpání mechanismu rozprašovače (aplikátoru). V tomto případě je možné odšroubovat aplikátor ze skleničky a ponořit sací hadičku do sklenice s teplou vodou. Aplikátor několikrát stlačte tak, aby došlo k nasání vody a pročištění aplikátoru.

Balení: 25 ml v hnědé skleněné lékovce s mechanickým nosním rozprašovačem s ochrannou krytkou.

Výrobce: VINCENTKA a.s., Lázeňské nám. 165, 763 26 Luhačovice, Česká republika

Datum poslední revize textu: 18.02.2021



Výrobce



Omezení skladovací teploty

Číslo šarže



Použit do data



Nahlédněte do návodu k použití

Informační linka: +420 577 131 260 nebo servis@vincentka.cz

www.vincentka.cz



VINCENTKA® nosový sprej STANDARD hypotonický SK

Zdravotnícka pomôcka na ošetrovanie sliznice nosovej dutiny a nosohltana, ktorá pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice a priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy, sínusitídy a chronickej polypóznej nazofaryngitídy; u detí pôsobí preventívne proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy.

Zloženie: Minerálna voda z prírodného liečivého zdroja, veľmi silne mineralizovaná, jódová, uhličitá, hydrogénuhličitano-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická, odželeznená.

Výťah analýzy zdroja BJ 305 - NOVÁ VINCENTKA® (RL PLZ MZ ČR - 2017):

Katióny (mg/l)		Anióny (mg/l)		Ostatné látky (mg/l)	
Li ⁺	8,05	F ⁻	2,99	Odželeznené	
Na ⁺	2330,00	Cl ⁻	1690	H ₂ SiO ₃	19,60
K ⁺	125,00	Br ⁻	7,03	HBO ₂	272,00
Ca ²⁺	231,00	I ⁻	6,70	CO ₂	2610,00
Mg ²⁺	16,90	NO ₂	< 0,01		
Sr ²⁺	3,94	NO ₃	< 0,50		
Ba ²⁺	6,67	HCO ₃ ⁻	4700,00	Celkom 9443,00 mg/l	
Mn ²⁺	0,52	HPO ₄ ²⁻	< 0,05	disociovaných a nedisociova-	
Al ³⁺	0,16	SO ₄ ²⁻	7,40	ných látok.	

Použitie: Pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice (funkciu riasinkového epitelu), umožňuje optimálne fungovanie tzv. sliznicovej imunity ako primárnej obrany pred infekciou. Používa sa na zvlhčenie sliznice celej nosovej dutiny a nosohltana predovšetkým pri pobyte v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, v priestoroch vykurovaných ústredným kúrením a prostredí znečistenom najmä prachovými časticami. Celkovým zložením hypotonickej kyselky s obsahom jodidov priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy, sínusitídy a chronickej polypóznej nazofaryngitídy. U detí pôsobí preventívne proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy. Aplikácia prípravku je vhodná aj pri stavoch po operáciách nosových mandlí. Odporúča sa tiež proti vzniku suchých zápalov nosovej sliznice a na prevenciu ich recidív. Prípravok je bezpečný pri dlhodobom používaní a nie je návykový.

Dávkovanie: 1 – 2 vstreknutia do každej nosnej dierky podľa potreby (denná dávka nie je obmedzená). 1 vstreknutie = 0,1 ml.

Pokyny na použitie: Zložte modrý ochranný kryt z aplikátora spreja a pred prvým použitím niekoľkokrát stlačte manžetu po obvode aplikátora, kým sa nezačne tvoriť aerosól. Začnite používať bežným spôsobom. Po každom použití aplikátor očistite a nasadte ochranný kryt.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Uchovávajú v suchu a tme pri teplote 0 °C až 25 °C. Po prvom použití spotrebujte do 6 týždňov. Uchovávajú mimo dosahu a dohľadu detí. Vysoký obsah minerálnych solí v nosovom spreji môže spôsobiť usadzovanie kryštálikov solí na dne liekovky, ktoré však neznižujú kvalitu obsahu. Tieto kryštáliky môžu spôsobiť upchatie mechanizmu rozprašovača (aplikátora). V takom prípade je možné odskrutkovať aplikátor z fľaštičky a ponoriť nasávaciu hadičku do pohára s teplou vodou. Aplikátor niekoľkokrát stlačte tak, aby došlo k nasatiu vody a prčisteniu aplikátora.

Balenie: 25 ml v hnej sklenenej liekovke s mechanickým nosovým rozprašovačom s ochranným krytom.

Výrobca: VINCENTKA a. s., Lázeňské nám. 165, 763 26 Luhačovice, Česká republika

Dátum poslednej revízie textu: 18.2.2021



Výrobca



Obmedzenie skladovacie teploty

Číslo šarže



Použit do dátumu



Pozrite si návod na použitie

Informačná linka: +420 577 131 260 alebo servis@vincentka.cz

www.vincentka.cz